



Secret^{RF} 2.0

Мультифункциональная
RF СИСТЕМА

Производство: Ilooda, Корея

Компания ICG –
эксклюзивный дистрибьютор Ilooda
на территории РФ



**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ**

SECRET RF – МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФРАКЦИОННАЯ RF СИСТЕМА С МИКРОИГЛАМИ

SECRET RF – это фракционная радиочастотная система с микроиглами, обеспечивающая высокую эффективность омоложения при минимальной инвазивности воздействия, результативное решение косметологических и дерматологических проблем в короткие сроки. Многофункциональная система включает в себя монополярный и биполярный микроигольчатый фракционный RF-лифтинг и дополнительную электроручку SmartCure (метод термокоагуляции).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

На кожу лица:

- Нехирургический лифтинг кожи
- Омоложение всего лица (включая подвижное веко, область под глазами, кончик носа)
- Разглаживание морщин кожи лица, шеи, декольте
- Повышение эластичности и упругости кожи
- Коррекция шрамов, рубцов, постакне
- Лечение угревой сыпи, расширенных пор, повышенной жирности кожи
- Гиперпигментация
- Лечение гравитационного птоза (в т.ч. «двойной подбородок»)
- Выравнивание рельефа и цвета кожи

На кожу тела:

- Лечение гипергидроза (потливости)
- Уменьшение стрий (растяжек)
- Удаление сосудистой сетки («звездочек»)

Secret^{RF} | ФРАКЦИОННАЯ RF ТЕХНОЛОГИЯ

В аппарате SECRET RF используется биполярная RF частота 2МГц и минимально инвазивные микроиглы для омоложения, объемной подтяжки тканей и улучшения качества кожи. Размещенные с высокой точностью микроиглы в картридже излучают строго контролируруемую радиочастотную энергию на определенную глубину для равномерной термокоагуляции. Настраиваемая интенсивность и глубина проникновения микроигл (в диапазоне от 0,5 до 3,5 мм) обеспечивают выраженный результат при минимальном повреждении эпидермиса. Радиочастотное воздействие способствует нагреву и денатурированию тканей, стимуляции фибробластов, как в субдермальных, так и в дермальных слоях кожи, что приводит к ремоделированию кожи. Фракционный RF лифтинг с микроиглами подходит для всех типов и фототипов кожи (в том числе, и для загорелой кожи).




Рис.1 Некроз кожи в глубоких слоях дермы



Рис.2 Процесс регенерации коллагена в течение 2 недель после процедуры на аппарате SECRET RF



КАК РАБОТАЕТ АППАРАТ Secret^{RF}

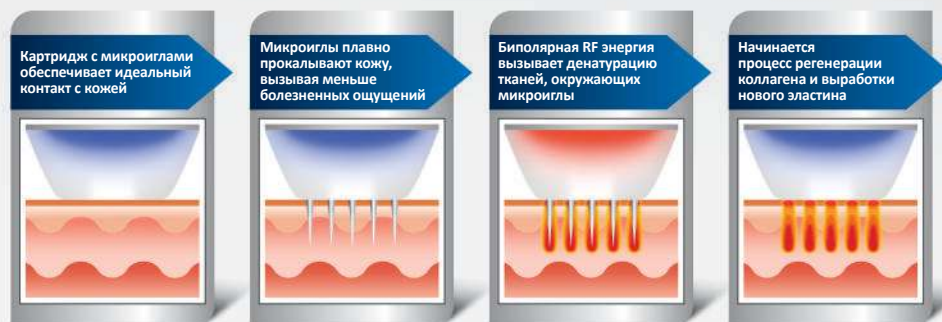

ШИРОКИЙ ВЫБОР КАРТРИДЖЕЙ

Различные виды картриджей позволяют специалистам эффективно решить любую косметологическую или дерматологическую проблему.

Secret^{RF}

Размер:
Д 196,5 x Ø62 x Ø41 (мм)
Вес: 500 г

Высокоскоростная ручка в сочетании с шаговым двигателем обеспечивает стабильную подачу RF энергии и мгновенное проникновение микроигл в кожу, что позволяет проводить процедуру быстрее, эффективнее и безболезненнее.



MTR-AC-25

картридж с неизолированными микроиглами

Область воздействия: 10*10 (мм)

Выходная мощность: 25 Вт

Назначение: широкий спектр показаний



MTR-AC-C-25

картридж с полуизолированными микроиглами

Область воздействия: 10*10 (мм)

Выходная мощность: 25 Вт

Назначение: получение высокого теплового эффекта в дерме / подкожно-жировой клетчатке



MTR-AC-10

картридж с неизолированными микроиглами

Область воздействия: 0,25*18 (мм)

Выходная мощность: 25 Вт

Назначение: стрии (растяжки), морщины вокруг глаз.



MTR-AC-C64

картридж с полуизолированными микроиглами

Область воздействия: 17,5*17,5 (мм)

Выходная мощность: 70 Вт

Назначение: гипергидроз, получение высокого теплового эффекта в дерме / подкожно-жировой клетчатке

МОНОПОЛЯРНЫЙ RF ЛИФТИНГ

НЕИНВАЗИВНАЯ RF ТЕХНОЛОГИЯ

Монополярный RF лифтинг это неинвазивная процедура по омоложению кожи лица. В монополярном модуле используется радиочастота 2 МГц, благодаря чему достигается глубокий прогрев дермального и гиподермального слоев кожи для стимуляции коллагена и омолаживающего результата.




Технические характеристики монополярного модуля

Частота RF	2 МГц
Выходная мощность	50 Вт
Интенсивность	0–100 (уровень), настройка 1 шаг
Повтор	Непрерывная волна
Продолжительность воздействия (радиоизлучение)	1–60 мин (1 мин шаг)
Размер электрода	Диаметр 15 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

SECRET RF обладает несколькими эксклюзивными техническими характеристиками, которые обеспечивают лидирующие позиции продаж во всем мире.

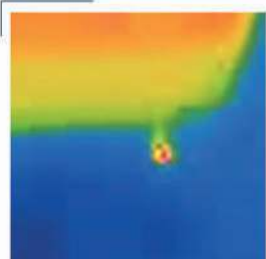

Совершенный аппарат – быстрый и долгоиграющий результат

SECRET RF – это выдающийся аппарат. Благодаря своим техническим характеристикам, высокой надежности и гарантированному результату – аппарат является самым продаваемым в мире. SECRET RF прицельно доставляет тепловую энергию в глубокие слои дермы в течение короткого времени воздействия. Неизолированные тонкие иглы создают эффективное глубокое ремоделирование, одновременно стимулируя 2 слоя кожи и вырабатывая коллаген и эластин по всей толще кожи.

Нет эпидермального ожога – ТОЛЬКО термический эффект

Короткий период реабилитации (1-2 дня) и единый термолиз

Для выполнения процедуры используется картридж с тончайшими микроиголами высокого класса. Радиочастотная энергия сосредоточена на кончике микроиглы, что обеспечивает минимальное повреждение эпидермиса и короткий период реабилитации. RF энергия подается целенаправленно в область воздействия, избегая любого нежелательного повреждения окружающих тканей. RF энергия не перекрывается, что гарантирует однородность зон термальной коагуляции.

- Медицинская степень стерильности
- Золотое покрытие микроигл
- Толщина иглы 0,2 мм
- Одноразовое использование



Точность и безопасность воздействия

Функция «время задержки» и визуальный индикатор позволяют удерживать иглы в конечной позиции до тех пор, пока RF излучение не будет полностью выполнено. Это эксклюзивная функция Hooda – «управление движением» обеспечивает точность воздействия и максимальную безопасность, предотвращая любые непредсказуемые повреждения поверхности кожи во время процедуры.



Продвинутый графический интерфейс



Удобный графический интерфейс пользователя предлагает готовые предустановленные протоколы процедур для различных показаний – для простоты в использовании и исключения риска врачебной ошибки.

Также есть возможность выбора индивидуальных настроек – для подбора оптимального режима для каждого клиента.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР

Сокращение периорбитальных морщин и носогубных складок



До лечения



После 2-й процедуры

Лечение гипергидроза



До лечения



После 3-й процедуры

Омоложение кожи лица и шеи:
две процедуры CO₂ + две процедуры RF +
три процедуры биоревитализации

Возраст пациентки – 73 года



До процедуры



Через 3 месяца



Через 6 месяцев

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН



« SECRET RF эффективен в разглаживании морщин, повышении эластичности и упругости кожи. Преимуществом аппарата является гарантированный предсказуемый результат воздействия и комфорт для клиента во время процедуры »

Майкл Наури

д.м.н,
Дерматологический и лазерный центр,
Международный центр лазерной косметологии
Ножан-сюр-Ман, Париж, Франция



« Меня очень вдохновляет то, как у возрастных пациентов морщины разглаживались даже после первого применения. SECRET RF зарекомендовал себя как эффективный аппарат для решения множества проблем в современной косметологии, в том числе для коррекции стрий и лечения гипергидроза »

Юрий Кирстен

врач-дерматолог, владелец и руководитель Клиники эстетической оперативной дерматологии и антивозрастной медицины,
Берлин, Германия



« SECRET RF – дает потрясающие результаты в лечении угревой сыпи, расширенных пор, коррекции шрамов постакне за короткое время процедур »

Адриан Лим

Бакалавр медицины и хирургии,
Дерматолог и флеболог
Клиники косметологии, дерматологии и флебологии Роял Норт Шор,
Сидней, Австралия

Технические характеристики SECRET RF

Выходная мощность	25 Вт (картриджи на 25 игл), 70 Вт (картриджи на 64 иглы)
Частота RF	2 МГц ± 20%
Интенсивность	0–100%, настройка по 10 шагов
Повтор	Одиночный; 0.2 с; 0.5 с; 0.8 с; 1 с; 2 с
Толщина иглы	0.2 мм
Площадь воздействия	1 x 1 см / 1.5 x 1.5 см
Глубина воздействия иглы	0.5–3.5 мм (0,1 шаг)
Продолжительность воздействия	50–950 мс

SmartCure™

МЕТОД ТЕРМОКОАГУЛЯЦИИ

SmartCure – это электроручка, которая позволяет сочетать различные методы термокоагуляции с одноразовой иглой для электролиза и различными иглами Nokoog для лечения ретикулярных вен, морщин и разных видов шрамов.



K3i

Одноразовая изолированная игла для электролиза воздействует на нежелательные ретикулярные вены и сосудистые звездочки с помощью передачи тепла к основной вене (которая является источником венозной «паутинки») без риска повреждения эпидермиса и окружающих тканей.

0,075 мм
для ретикулярных вен



AC-01

Одноразовая изолированная игла предназначена специально для лечения акне и морщин вокруг глаз. Благодаря герметичной верхушке длиной 1,5 мм игла эффективно коагулирует сальные железы, не повреждая при этом эпидермис.

1,5 мм
лечение акне / против морщин



27G / 22G / 19G

Методика субцисии (подсечение) в сочетании с радиочастотной энергией обеспечивает значительное разглаживание носогубной складки и атрофических послеугревых рубцов. Простой и безопасный способ применения: введите иглу под кожу (параллельно поверхности кожи), плавно двигайте иглу вперед и назад с одновременным воздействием RF энергии между дермой и подкожной тканью.

коррекция шрамов / разглаживание носогубной складки



Технические характеристики SmartCure

Частота RF	2 МГц
Выходная мощность	9 Вт
Интенсивность	10–100 (уровень), настройка по 2 шага



Эксклюзивный дистрибьютор Hlooda на территории РФ – ICG (International Cosmetic Group)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Чайковского, 17
тел.: (812) 565-52-57

МОСКВА
ул. Баркляя, 6, стр. 3, офис 10
тел.: (495) 445-37-71

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Блюхера, 45
тел.: (343) 363-84-38

www.estheline.ru
www.icg-group.ru